

jota kit 1449 Esthetic Veneer Prep Kit

Siete pasos para una preparación perfecta de carillas

Una selección de instrumentos para la preparación de carillas adaptadas anatómicamente.

Mínima abrasión del esmalte

Una preparación perfecta para un revestimiento estético.



jota kit 1449 Esthetic Veneer Prep Kit


¡Guía de preparación para una carilla estética!

Un kit de instrumentos óptimamente armonizado, permite al dentista lograr resultados excelentes en una fracción de tiempo. La expectativa del paciente para una sesión individual de tratamiento ya no será un desafío, pero se ha convertido en un estándar para la odontología de vanguardia. Para una mejor introducción, le proporcionamos, además de nuestro "Kit Jota para la preparación de carillas estéticas 1449", guía de aplicación y un video de formación paso-a-paso.




Preparación:

Antes de comenzar con la preparación, debe tomarse una impresión de silicona de la situación actual.

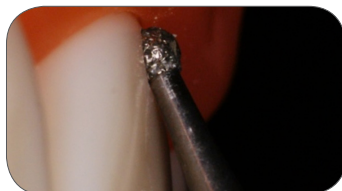

Paso 1:

El primer paso es la preparación de la marca de profundidad en el margen gingival, así como de las líneas proximales con el instrumento de diamante 801. Tras preparar las marcas de profundidad, señálelas con un marcador de color.

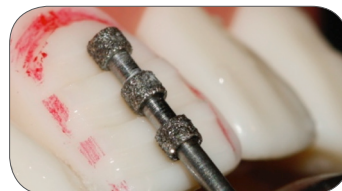

Paso 2:

Preparación de tres marcas de profundidad de 0,4mm en la superficie labial con el diamante 834. Tras la preparación de las marcas de profundidad señálelas con un marcador de color.

Velocidad recomendada:

aprox. 300000 rpm.

Velocidad recomendada:

aprox. 160000 rpm.



Paso 3:

Reducción de la superficie facial con el instrumento cónico de diamante 852. Se recomienda realizar una evaluación de la profundidad de la preparación con la impresión de silicona, durante el proceso de reducción.

Velocidad recomendada:

aprox. 280000 rpm.




Paso 4:

Tras la reducción de la superficie facial, hay que realizar el acabado de las líneas proximales y el margen gingival utilizando el diamante de grano de tamaño pequeño 852F.

Velocidad recomendada:

aprox. 160000 rpm.

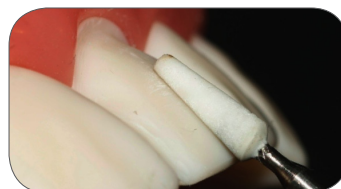

Paso 5:

Para crear una superficie perfectamente lisa, se utiliza la piedra de **Arkansas 649** de Jota.

Velocidad recomendada:

aprox. 160000 rpm.



Paso 6:

La reducción en los bordes proximales se marca con el instrumento de **diamante 852**.

Velocidad recomendada:

aprox. 280000 rpm.



Paso 7:

Finalmente, la reducción incisal se marca y elimina con el **diamante 852**.

Velocidad recomendada:

aprox. 280000 rpm.

Resultado final



jota kit 1449 Esthetic Veneer Prep Kit

801.FG.018



Recortador de diamante Redondo con grano de tamaño medio para indicar la profundidad de la preparación en el margen gingival.

↻ 300000 rpm

852F.FG.016



Recortador de diamante con grano de diamante natural de tamaño pequeño. Este instrumento deja una superficie muy lisa después de la preparación. La forma cónica con punta redondeada es idea para el postprocesamiento de los márgenes y las superficies más grandes.

↻ 280000 rpm

834.FG.018



Instrumento de diamante con grano de tamaño medio para la preparación de tres marcas de profundidad de 0,4mm en la superficie labial.

↻ 160000 rpm

649.FG.025.ARK



La piedra de Arkasas fabricada con granos de corindón de alto grado y tamaño muy pequeño, es perfecto para el acabado final en el que se crea una superficie absolutamente lisa.

↻ 160000 rpm

852.FG.016



Recortador de diamante con grano de diamante natural de tamaño medio. Este instrumento de forma cónica con punta redondeada es ideal para la remoción de esmalte de la superficie facial.

↻ 280000 rpm

Distribuidor JOTA

04/2015